



Каталог

Осветитель HEINE MicroLight

Компактный налобный осветитель с технологией LED HQ - теперь свет еще ярче!




- Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, синее — синим. Цветовая температура: 4000 К (стандартная), коэффициент цветопередачи (CRI) > 90, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 75.
- Компактность и легкость. Обеспечивает идеальный комфорт.

- **Алюминиевый корпус.** Эксклюзивный алюминиевый корпус защищает оптику от пыли и влаги, обеспечивая исключительно долгий срок службы и оптимальный тепловой режим.
- **Коаксиальное освещение:** компактная коаксиальная конструкция полностью гарантирует получение изображения без теней и обеспечивает отличное освещение труднодоступных областей.
- **Гомогенность:** абсолютно яркое однородное по всей исследуемой области световое пятно, обеспечивающее идеальное освещение для любого обследования.
- **НОВИНКА:** соединительный кабель SC 1. Сменный соединительный кабель с высококачественным защищенным от брызг резьбовым соединением длиной 1,6 м. Соединяет MicroLight с mPack mini.
- **НОВИНКА:** в набор входят цветные клипсы для индивидуализации. Они предназначены для фиксации кабеля, а также для идентификации вашего налобного осветителя.


Технические характеристики

Освещение	55 000 люксов
Температура цвета	4000 К
Срок службы светодиода	50 000 часов
Вес	80 г с S-FRAME, 190 г с обрубком Lightweight
Угол наклона	Возможность плавной индивидуальной настройки для каждого обследования
Время работы	9 часов с mPack mini (непрерывная работа на полной мощности — 4 часа)

- Прецизионная многолинзовая оптическая система состоит из четырех высококачественных линз. Полностью гомогенное освещение всего поля обзора, а также яркое и четкое пятно света.

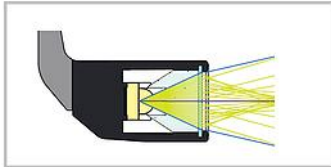

Обычная система [02]

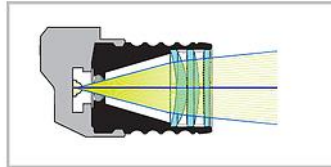

Прецизионная система HEINE из 4 линз [03]



Сравнение гомогенности

Способы крепления Оправа HEINE S-FRAME



- Максимальный комфорт благодаря современному эргономичному дизайну.
- Мягкие дужки и носовой упор. Могут быть адаптированы для любого лица.
- Применение инновационных материалов — карбон (Carbon-Kinetium) — способствует снижению веса (80 г вместе с MicroLight).

Обруч HEINE Lightweight



- Легкость (190 г вместе с MicroLight). Идеально подходит тем, кто носит очки.
- Полностью подстраивается под любой тип головы.
- Гигиеничные и мягкие кожаные подушечки.

Зарядный блок HEINE mPack mini



Компактный и легкий источник питания для LoupeLight / MicroLight

- Стандартное время работы — 9 часов. Непрерывная работа на полной мощности - 4 часа (стандарт).
- Стандартное время зарядки — 4 часа.
- Компактность и легкость. Хранение источника питания не представляет трудностей, поскольку его вес составляет всего лишь 81 г, а габариты — 44 x 23 x 101 мм.
- Свобода от проводов, которые привязывают пользователя к настольному, настенному или стационарному источнику питания.
- Индикатор заряда. Отображает оставшийся заряд батареи с помощью трех светодиодов. Мигание последнего светодиода указывает на необходимость срочной зарядки. Во время зарядки светодиоды загораются один за другим.

- Плавный контроль интенсивности освещения. Оптимальная настройка яркости в диапазоне от 3 до 100 % сокращает количество бликов.
- Кабель USB с подключаемым источником питания E4-USB, одобренным для медицинского применения.
- Встроенный модуль гальванического разделения защищает батарею и пользователя от последствий неисправной подачи энергии, таким образом предотвращая вероятность попадания полного напряжения питающей сети на корпус. Рекомендуется использовать подключаемый источник питания, одобренный для медицинского применения.
- Простая очистка. Цельный корпус, на боках отсутствуют швы, малое количество граней.
- Клипса на пояс mPack mini. Сумка для простой фиксации источника питания на ремне или одежде.
- Литий-ионная технология. Отсутствие «эффекта памяти». Не беспокойтесь об уровне заряда или состоянии батареи.



Наборы осветителя HEINE MicroLight



MicroLight 2

MicroLight 2, оправа S-FRAME, mPack mini, чехол с клипсой на пояс, адаптер сетевой E4-USB, шнурок, чистящая жидкость и кейс [01]

J-008.31.276

MicroLight 2, обруч Lightweight, mPack mini, чехол с клипсой на пояс, адаптер сетевой E4-USB и кейс [02]

J-008.31.277

Желтый фильтр [03]

C-000.32.241

Соединительный кабель SC 1 (1,6 м) для MicroLight 2/mPack mini [04]

C-000.32.240